

Kuh
ei
n Bier
uh
Bier



Bedienungsanleitung

Mode d'emploi



Elektrischer Dusch-Nachtstuhl
Chaise douche toilettes électrique

M2-Multi-Tip



M2 MULTI-TIP



Bedienungsanleitung

A	Allgemeine Information
B	Montageanleitung
C	Fernbedienung
D	Gebrauch des Stuhls
E	Extra Zubehör
F	Generelles
G	Sicherheit
H	Aufladen / Batteriestatus



WICHTIG!

LADEN SIE DEN STUHL NACH JEDEM GEBRAUCH WIEDER AUF.

STECKEN SIE DAS AUFLADEGERÄT NICHT ANS STROMNETZ, BEVOR DIESES MIT DEM STUHL VERBUNDEN IST.

BEI NIEDRIGEM BATTERIESTATUS ERTÖNT EIN WARNSIGNAL. DER STUHL MUSS BEIM ERTÖNEN DES WARNSIGNALS SOFORT AUS DEM BETRIEB GENOMMEN UND AUFGELADEN WERDEN, DA ANDERENFALLS DIE BATTERIE ODER DER STUHL BESCHÄDIGT WERDEN KANN.


FALLS DIE MOTOREN ZUR HÖHENJUSTIERUNG, DURCH DEN NIEDRIGEN BATTERIESTATUS, NICHT SYNKRON LAUFEN KANN DER STUHL BESCHÄDIGT WERDEN. IN DIESEM FALL MUSS DIE NOTABSENKUNG AKTIVIERT WERDEN, UM DURCH DIESE DEN STUHL IN DIE NIEDRIGSTE POSITION ZU BRINGEN. BEIDE MOTOREN MÜSSEN KOMPLET ABGESENKT SEIN BEVOR DIE NOTABSENKUNG WIEDER DEAKTIVIERT WIRD. VOR DER WIEDERINBETRIEBNAHME MUSS DER STUHL GELADEN WERDEN.

(WENN DIE BATTERIE ENTLADEN IST KÖNNEN DIE MOTOREN NICHT BETÄTIGT WERDEN INDEM DER STUHL ANS STROMNETZ GESCHLOSSEN WIRD. DIE BATTERIE MUSS VORHER GELADEN UND DER STUHL VOM NETZ GENOMMEN WERDEN. DER STUHL IST NACH 8 STUNDEN KOMPLET GELADEN.



LADEN SIE DEN STUHL NICHT IN DER NÄHE VON WASSER AUF.

BETÄTIGEN SIE NICHT DIE ELEKTRISCHEN FUNKTIONEN DES STUHLS WENN DIESER IN VERBINDUNG MIT WASSER IST.




A M2 Multi-tip
Dusch-/Toilettenstuhl bestimmt für den Bad und WC Gebrauch.

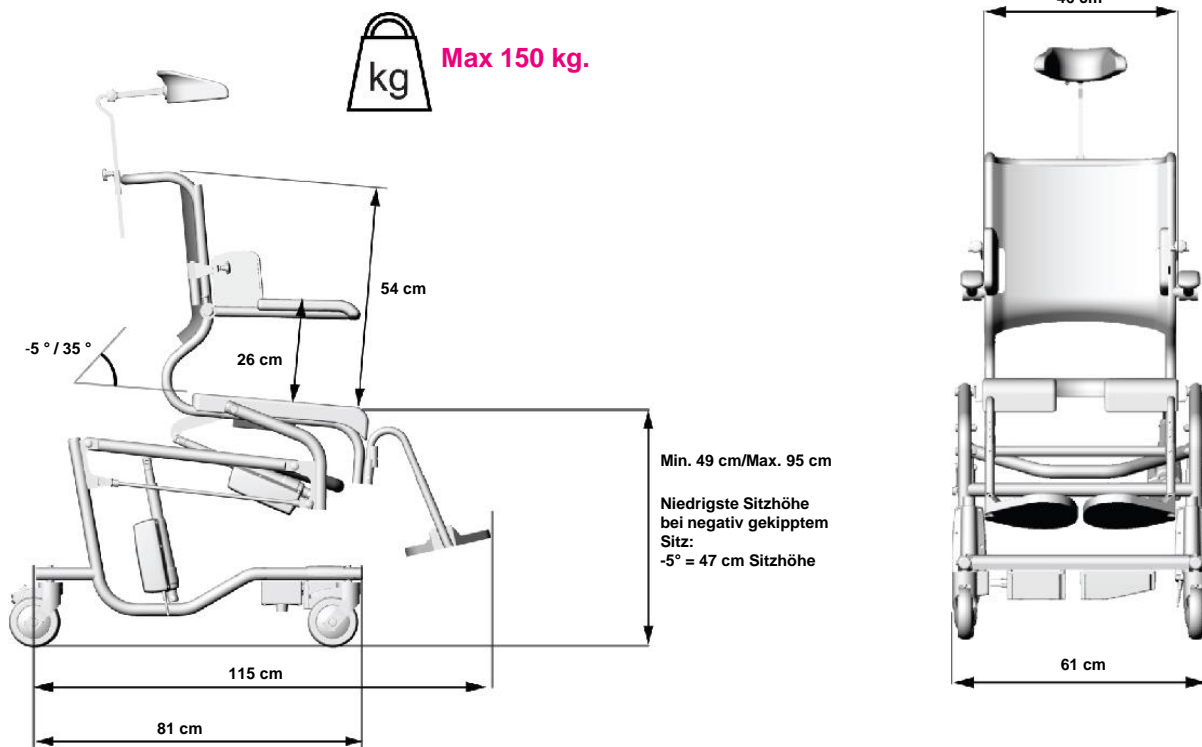



Eigengewicht 30,5 kg.

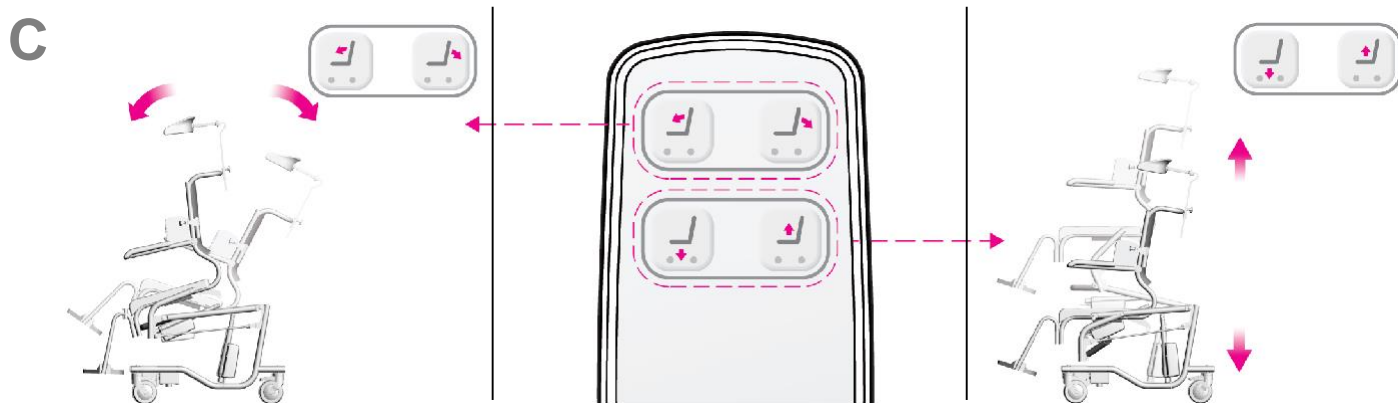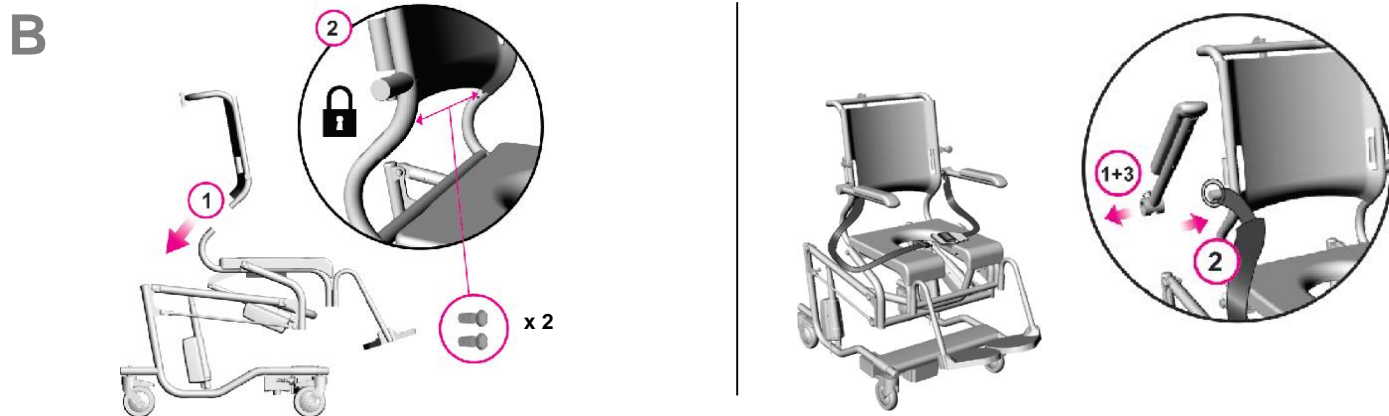

D

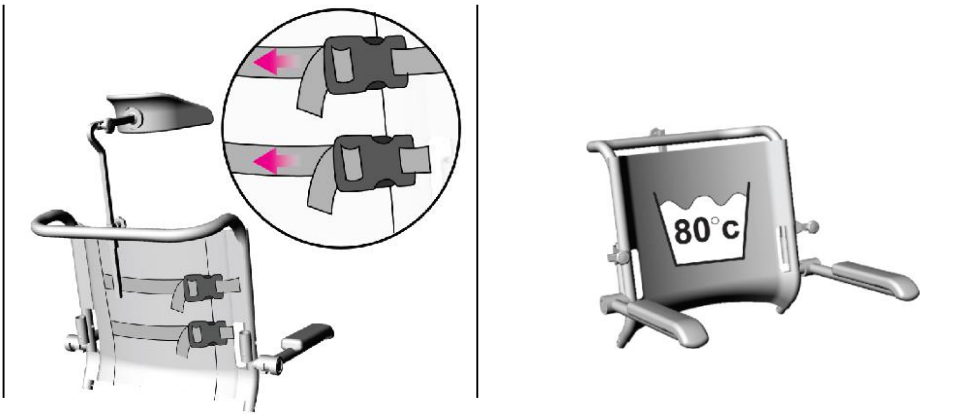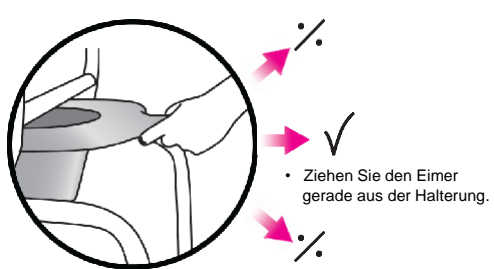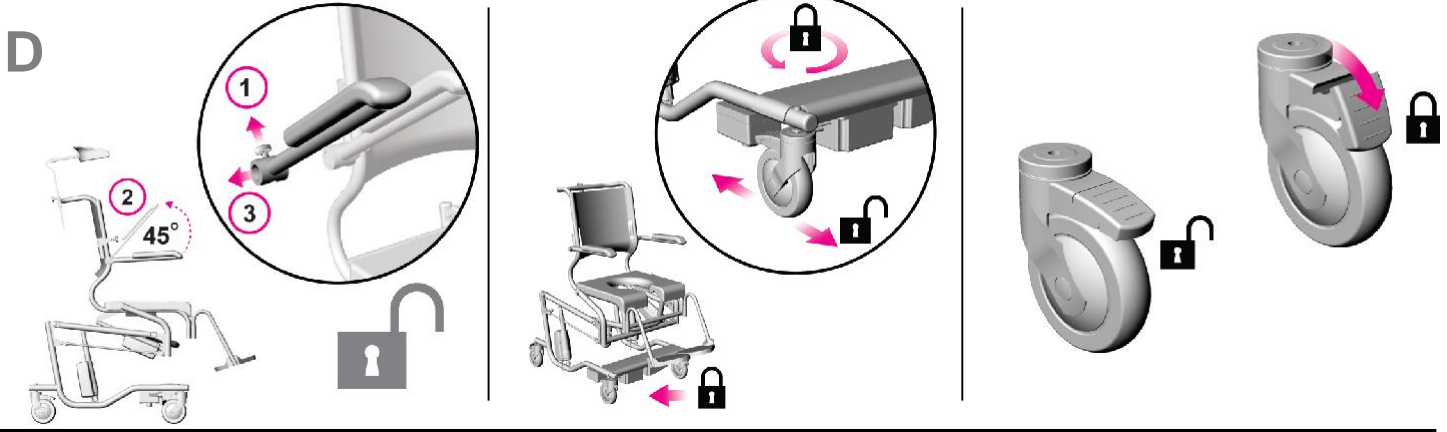

E

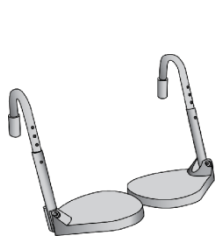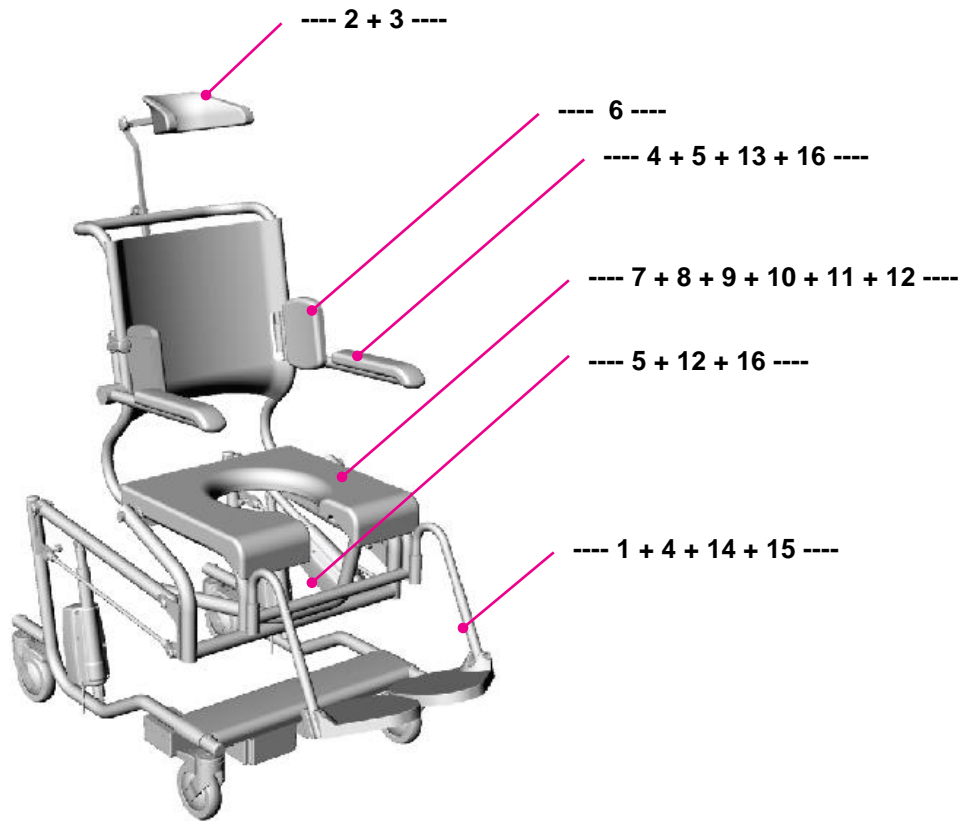


----- 1 -----
• Fußstützen

Art. Nr. 310049




----- 2 -----
• Nackenstütze. Höhen, tiefen und breiten justierbar.

Art. Nr. 310871

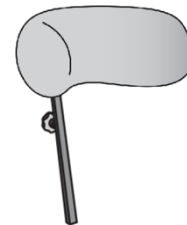

----- 3 -----
• Nackenstütze, supersoft


Art. Nr. 310870

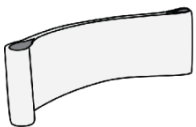


----- 4 -----
• Wadenstütze



Art. Nr. 310226

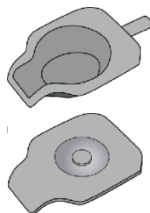

----- 5 -----
• Intimeimer

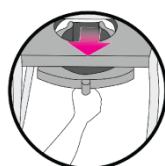


Art. Nr. 310048



----- 6 -----
• Seitenstützen

Art. Nr. 310880

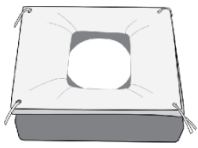

----- 7 -----

- Schaumkissen mit Bezug


Art. Nr. 330016



----- 8 -----


- Sitzaufsatz mit kleinem Loch

Art. Nr. 800178

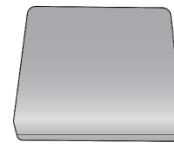


----- 9 -----

- Deckel für Standardsitz

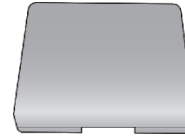

Deckel für Sitz mit Intimöffnung


Art. Nr. 310343

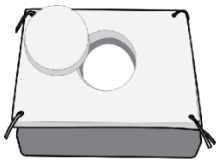

----- 10 -----

- Supersoft schaumkissen, ohne Bezug mit loch

Art. Nr. 330018

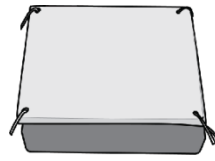

----- 11 -----

- Schaumkissen, ohne Bezug und Loch

Art. Nr. 330022



----- 12 -----


- Urinrichter

Art. Nr. 148861



----- 13 -----

- Querstange

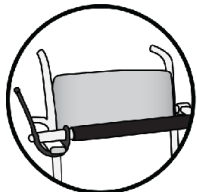

Art. Nr. 310228



----- 14 -----

- Höhenverstellbare Beinstütze


Art. Nr. 310052



----- 15 -----

- Fußplatte für Höhenverstellbare Beinstütze

Art. Nr. Rechts 310085
Art. Nr. Links 310086

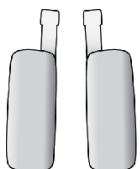


----- 16 -----

- Hemiplegi armlernen





Art. No. Set 800275
Art. Nr. Rechts 800274
Art Nr. Links 800273

F


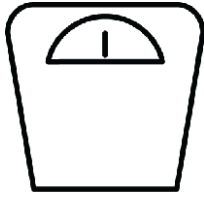


Max 150 kg.

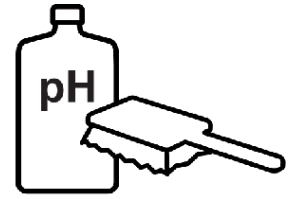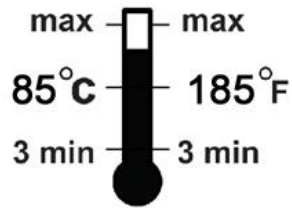


Min 5 - Max 9


G

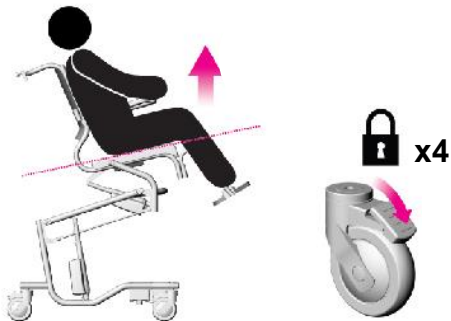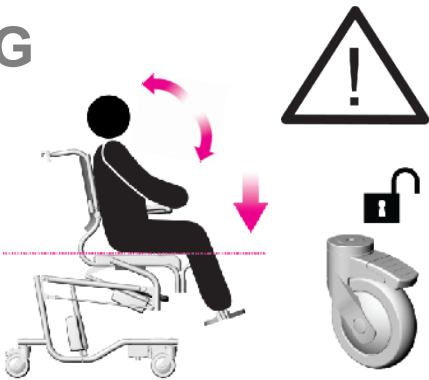

- Beim Betrieb des Stuhls müssen die Hände des Benutzers im Schoß platziert sein, falls der Benutzer seine Hände nicht aus eigener Kraft auf den Armlehnen halten kann.

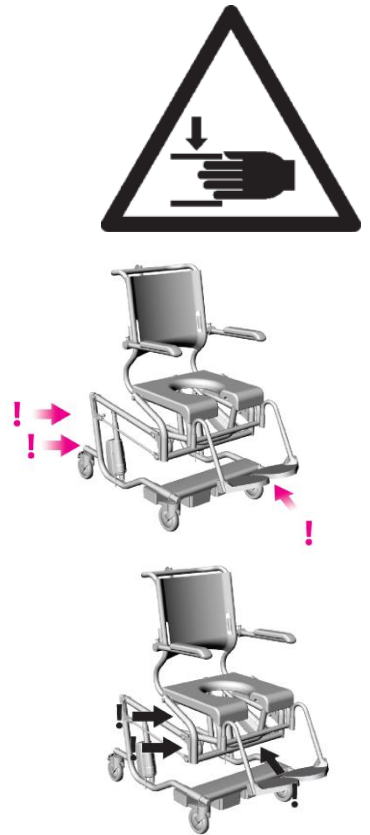


- Notabsenkung
- Falls der Stuhl bei einem Defekt nicht durch die Fernbedienung abgesenkt werden kann.

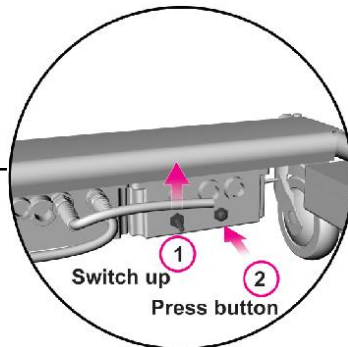

Notfallknopf


Im Notfall kann das elektrische System des Stuhls durch drücken des Notfallknopfs unterbrochen werden.

Das elektrische System wird durch erneutes drücken des Notfallknopfes wieder aktiviert.

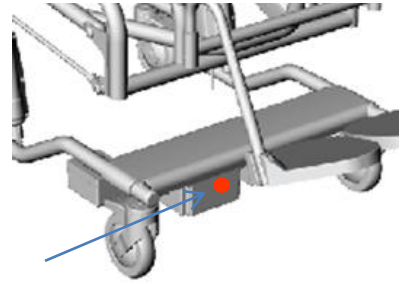


H




Aufladeanleitung

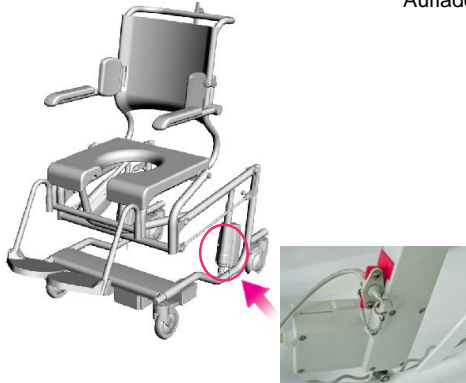

**LADEN SIE DEN STUHL
NACH JEDEM
GEBRAUCH WIEDER
AUF.**

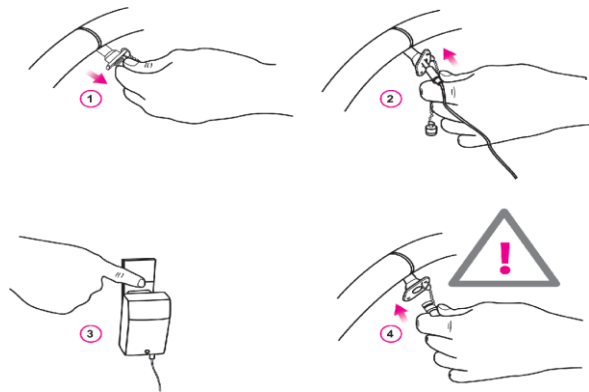

Bei niedrigem
Batteriestatus ertönt:

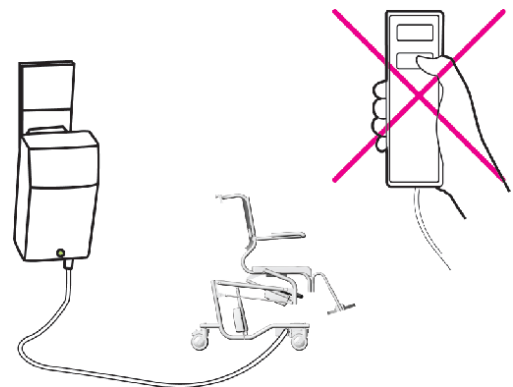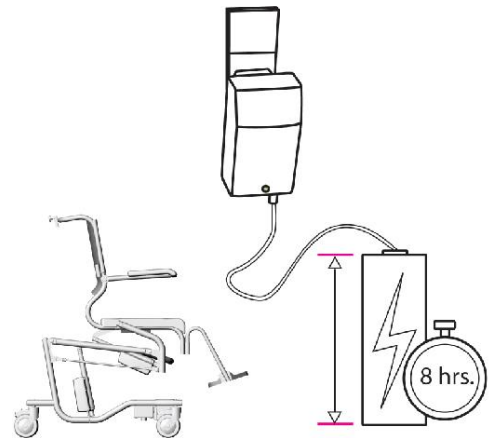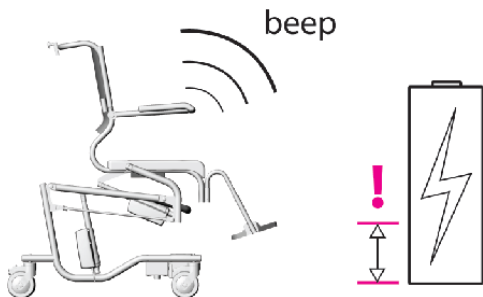

Garantie:

2 Jahre Reklamationsrecht auf Fabrikations-fehler. 1 Jahr auf Batterien.

Reklamationsrecht auf Rahmen


HMN bietet 5 Jahre Reklamationsrecht auf Rahmenbruch für alle M2 Dusch-/Toilettenstühle.
Das Reklamationsrecht deckt Produktionsfehler und Materialfehler, jedoch nur wenn das Produkt im Normalgebrauch genutzt worden ist.

Händler



HMN since 1934

Hersteller:
HMN a/s
Midtager 22
DK-2605 Brøndby
Denmark
Tlf: +45 43 96 24 00
E-mail: info@hmn.dk
www.hmn.dk

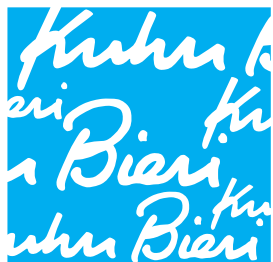

Kuhn und Bieri AG

Rehaprodukte und Dienstleistungen für Heime, Spitäler und Spitex
Produits réha et services pour homes, hôpitaux et organismes de soins à domicile

Sägestrasse 75, CH-3098 Köniz
Telefon 0848 10 20 40, Fax 031 970 01 71, info@kuhnbieri.ch

kuhnbieri.ch